



Baclín Cosmética S.A. de C.V.

BACTIUM® NEUTRO
CONCENTRADO LIMPIADOR

Este producto concentrado es especial para lavado de instrumentos metálicos y aparatos de medida de precisión, así como para instrumentos médicos que son sensibles a cualquier agente de limpieza agresivo.

Debido a sus características contiene un gran poder detergente y suavidad por su acción neutra, es muy apropiado para limpiar gafas y otros objetos que entren en contacto con el cuerpo humano.

Debido a que el **BACTIUM® NEUTRO** reduce la tensión superficial del agua, así como la viscosidad del agua, la solución de lavado escurre excelentemente bien de los instrumentos.

Son ideales para aplicar sobre baños de ultrasonido, debido a que realizan una eliminación completa de suciedad resistente, que es una ventaja sobre los baños de inversión tradicionales.

En caso de realizar procesos de aclarado se recomienda el uso de agua destilada, incluso en el baño de ultrasonido, sobre todo en el caso que el aclarado deba realizarse libre de residuos y manchas.

MODO DE EMPLEO

Todo el material de lavado se sumerge totalmente en una solución al 2% entre ½ y 2 hrs para aquel que esté ligeramente sucio y al 5% o 10% para aquellos residuos problemáticos tales como yeso sangre o aceite pesado; se pueden manejar tiempos más prolongados de remojo, o bien temperaturas más altas de 50° C para facilitar el lavado.

SOLUCION AL 5%

pH 7.0

Debido a que el empleo de **BACTIUM® NEUTRO** se utiliza en muy bajas concentraciones, el costo resulta bastante bajo.



APLICACIONES:

Aceite y aceites pesados

Acero especial

Almidón

Aminas

Bronce

Caucho

Centrales lecheras

Cinc

Consultas de dentistas

Cristales de gafas

Cubetas

Depósitos calcáreos

Fabricas de cerveza

Industria alimentaria

Instrumentos y material para el laboratorio

Laboratorios de análisis

Latón

Marcadores

Material de cuarzo

Material de vidrio y porcelana

Material metálico

Material plástico

Medios de cultivo

Mesas

Mucosidad

Neutralización

Níquel

Pipetas

Recipientes de test enzimáticos

Residuos de yeso

Ultrasonidos

Vidrio de farmacia

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

El fabricante y sus distribuidores solo responden por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenaje, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.