



Baclín Cosmética S.A. de C.V.

BACTIUM® PLUS **464 - SN**

**ESTERILIZANTE DE ALTO NIVEL PARA MATERIAL
E INSTRUMENTAL MEDICO**

"LA SOLUCION" PARA EVITAR INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

BACTIUM® PLUS ES UNA SOLUCION ESTERILIZANTE CONCENTRADA, FORMULADA POR UN COMPLEJO ENTRE UNA SAL MEJORADA DE AMONIO Y AGENTES TENSOACTIVOS.

POR LO ANTERIOR ES UN EXCELENTE BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA Y ESPORICIDA, QUE CONSERVA SUS PROPIEDADES HASTA POR 24 MESES.

ES EXCELENTE PARA LA COMPLETA ELIMINACION DE MICROORGANISMOS COMO:

**HIV - HEPATITIS B - SALMONELLA - PSEUDOMONAS - STHAPILOCOCCO -
CANDIDA - BACTERIAS GRAM (+) - BACTERIAS GRAM (-) Y OTROS**

NO ES TOXICO

CARACTERÍSTICAS DEL BACTIUM® PLUS

EL PRODUCTO CONCENTRADO O DILUIDO NO CAUSA NINGÚN RIESGO, NI EN SU MANEJO, YA QUE NO LO ABSORBE LA PIEL, NI CAUSA IRRITACION Y NI SENSIBILIDAD.

DE ACCION RAPIDA

SOLO BASTAN 10 MINUTOS DE ACCION DEL BACTIUM® PLUS PARA ELIMINAR EL 99.999% DE LOS MICROORGANISMOS.

NO ES CORROSIVO

BACTIUM® PLUS NO OCASIONA NINGÚN DAÑO AL INSTRUMENTAL O AL EQUIPO QUE SE VA A ESTERILIZAR.

BIODEGRADABLE

BACTIUM® PLUS DEBIDO A SU BALANCE EN LA FORMULA ES TOTALMENTE BIODEGRADABLE Y SOLUBLE EN AGUA.

ECONOMICO

POR SU ALTA CONCENTRACION ESTERILIZANTE, REDUCE SUBSTANCIALMENTE LOS COSTOS DE APLICACIÓN.

RESISTENTE

BACTIUM® PLUS ACTÚA AUN EN PRESENCIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS COMO SANGRE Y TODO TIPO DE SECRECIONES.

VERSATIL

PUEDE ESTERILIZAR INSTRUMENTAL MEDICO Y DENTAL, EQUIPO DE ANESTESIA, DE INHALOTERAPIA, DE UROLOGIA, ETC. ASÍ COMO SALAS DE PARTO, QUIROFANOS, SALAS DE TERAPIA INTENSIVA, ETC.

DURABLE

PUEDE UTILIZARSE LA MISMA SOLUCION DE BACTIUM® PLUS POR UN PERIODO DE HASTA 45 DÍAS.

CONFIABLE

BACTIUM® PLUS HA PASADO LOS MAS ESTRICTOS CONTROLES DE CALIDAD.

SUR 111 NUMERO 341, COLONIA HEROES DE CHURUBUSCO C.P. 09090 IZTAPALAPA MEXICO, D.F.

TELEFONOS: 56-46-70-05 56-97-58-53 56-46-59-17 FAX: 55-81-34-71

e-mail: prodequi@prodigy.net.mx www.baclincosmetica.com



Baclín Cosmética S.A. de C.V.

INMERSION

APLICACIONES DEL BACTIUM® PLUS
EN UN RECIPIENTE SE PREPARA LA SOLUCION DESEADA USANDO UNA DILUCION DE 20 ML DE BACTIUM® PLUS POR CADA LITRO DE AGUA.
EL MATERIAL DEBERÁ QUEDAR SUMERGIDO DURANTE 10 MINUTOS PARA GARANTIZAR LA COMPLETA ESTERILIZACION.

ASPERSION

USANDO 80 ML DE BACTIUM® PLUS POR CADA LITRO DE AGUA, SE PUEDE APLICAR TAMBIEN CON UN ASPERSOR O ATOMIZADOR. SE RECOMIENDA PARA LAS SALAS DE PARTO, TERAPIA INTENSIVA, UCIN, UTIP, QUIROFANO, TEC.

DESINFECCIÓN

USANDO 50 ML DE BACTIUM® PLUS EN UN LITRO DE AGUA. PARA DESINFECCIÓN DE BAÑOS, LAVABOS, MESAS, PISOS, PAREDES, TEC.

NOTA:

SE RECOMIENDA EL SISTEMA DE 2 CUBOS PARA EVITAR SUMERGIR LA JERGA USADA EN LA SOLUCION QUE CONTIENE EL **BACTIUM® PLUS**, SE PREPARA OTRO RECIPIENTE CON AGUA LIMPIA, PARA ENJUAGAR ANTES DE VOLVER A INTRODUCIR EN LA SOLUCION DE **BACTIUM® PLUS**

GARANTIA

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL NÚMERO DE LOTE CORRESPONDIENTE.

REGISTRO

S.S.A (SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA). Reg. 1042C2001

CONSERVESE EN LUGAR FRESCO Y SECO

HECHO EN MEXICO POR:

**BACLIN COSMETICA, S.A. DE C.V.
SUR 111 NO. 341 COL. HÉROES DE CHURUBUSCO,
MEXICO 09090 D.F.**

TEL: 5646 7005, 5697 5853 Y 5582 9042 FAX: 5581 3471

SE RECOMIENDA PRE ESTERILIZAR EL MATERIAL CON BACTIUM PREST

NOTA:

EL FABRICANTE Y SUS DISTRIBUIDORES SOLO RESPONDEN POR EL CONTENIDO NETO Y LA FORMULACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO.

EL ALMACENAJE, TRANSPORTE, MANEJO, APLICACIÓN Y DILUCION ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL.

® **MARCA REGISTRADA.**