



# BACTIUM® PREST

DETERGENTE PRE-ESTERILIZANTE  
CONCENTRADO  
PARA MATERIAL E INSTRUMENTAL  
MEDICO Y SUPERFICIES

**“LA SOLUCIÓN” PARA EVITAR INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS**

**Bactium® Prest** es un pre-esterilizante concentrado que tiene excelentes propiedades disolventes, desincrustantes y emulsionantes, y es ideal para lavar instrumental y equipo médico. Se recomienda usarlo antes de esterilizar o desinfectar con **Bactium® Plus**, en cuyo caso deberá enjuagarse perfectamente antes de pasarlo al **Bactium® Plus**. También se recomienda para lavar superficies como pisos, paredes, tarjas, etc.

## Características del Bactium® Prest

- Es una mezcla de detergentes y agentes tensoactivos de gran eficacia.
- Reúne las principales características de un buen detergente: no mancha las superficies, no es tóxico ni corrosivo, es biodegradable, es hipoalergénico, muy soluble y además es de muy fácil enjuague, por lo que contribuye a ahorrar agua.
- Por su alta concentración es un producto muy económico.
- Se pueden lavar sin ningún riesgo: instrumental médico y dental de acero inoxidable, artículos de plástico, hule, látex, pvc, mangueras, mascarillas para oxígeno, instrumentos de anestesia, resucitadores de silicón; así como pisos, paredes, tarjas, mobiliario, etc.



## **Instrucciones:**

Para inmersión de material o instrumental: En un recipiente o charola se prepara una solución con 20 ml de **Bactium® Prest** por cada litro de agua para suciedad ligera o 50 ml para suciedad acentuada. Se sumerge el material en la solución, cuidando que quede totalmente cubierto. Se deja entre 15 y 30 minutos, dependiendo del grado de suciedad.

- ◆ Para aumentar la eficacia se recomienda usar agua caliente y de ser necesario tiempo más prolongados de inmersión. Enjuagar perfectamente con agua el material o instrumental y después pasarlo a esterilización sumergiéndolo en **Bactium® Plus**.
- ◆ Se puede aplicar con atomizador o aspersor en superficies, muebles, tarjas, incubadoras, etc. Con una dilución de 15 ml por cada litro de agua.
- ◆ Para lavar superficies como pisos, paredes, tarjas, lavabos, muebles, equipo médico, incubadoras, etc. Se prepara una solución con 15 ml de **Bactium® Prest** por cada litro de agua.
- ◆ Se recomienda el sistema de 2 cubos: uno con la solución preparada con **Bactium® Prest** y otro con agua limpia para enjuagar el trapo o compresa antes de volver a introducirlo en la solución preparada. Después se debe enjuagar perfectamente con agua y aplicar **Bactium® Plus** por cualquiera de sus procedimientos.

El producto concentrado o diluido no causa ningún riesgo en su manejo es muy estable y no pierde sus propiedades durante 12 meses a partir de la fecha del lote correspondiente.

Presentación: Garrafa de 5 litros.

Garantía: estabilidad del producto de 12 meses a partir de la fecha del lote correspondiente.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

El fabricante y sus distribuidores solo responden por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenaje, transporte, manejo, aplicación y dilución están fuera de nuestro control